


SMI-SPON

ABSORBABLE GELATIN SPONGE

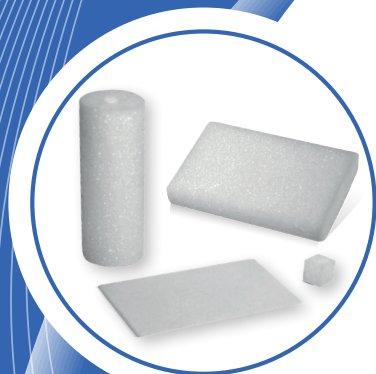


SMI hemostaatiline käs

- ✓ Tagab kindla ja kiire hemostaasi, peatab verejooksu tõhusalt - vähendab märkimisväärselt verekaotust
- ✓ Imab 30-40 korda rohkem verd ja vedelikku kui enda kaal
- ✓ Saab kergesti lõigata soovitud suurusesse, ei kleepu kinnaste ega instrumentide külge
- ✓ Võib kasutada kuiva või steriilse füsioloogilise lahuse või antibiootikumidega immutatuna
- ✓ Gamma steriliseeritud, individuaalselt blisteris ja kohe kasutusvalmis

Eelised

- ✓ Puudub kapseldumise oht
- ✓ Niisutamisel ei lagune
- ✓ Kiirendab patsiendi paranemist
- ✓ Bioloogiliselt sobiv, pürogeenivaba, mittetoksiline, mitteallergeenne ja mitteimmunogeenne
- ✓ Täielikult imenduv 3-4 nädala jooksul, ei jäta jääke ega põhjusta kapseldumist

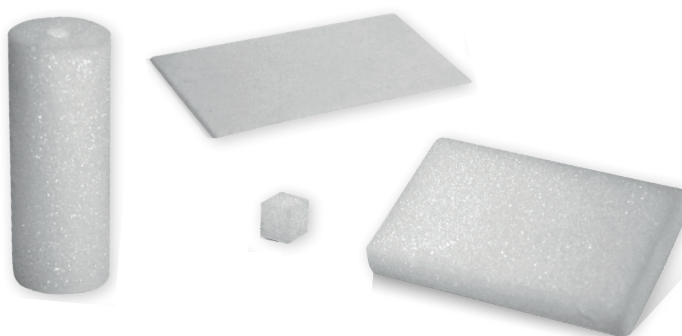

*For quality
&
safety*



www.sutures.be

SMI-SPON

ABSORBABLE GELATIN SPONGE

Mis on SMI-SPON

SMI-SPON on kirurgiline hemostaatiline käsnn, mis on valmistatud kõrge puhtusastmega esmaklassilisest želatiinist ja kasutamiseks erinevates kirurgilistes protseduurides.

See on kiire ja tõhus hemostaatiline vahend, mis peatab verejooksu kiiresti ning vähendab operatsiooni ajal verekaotust ja liigset ajakadu.

Miks kasutada SMI-SPONi

Kui SMI-SPON käsna kasutatakse organismis sobivas koguses, imendub see täielikult 3-4 nädala jooksul. SMI-SPON on biosobiv, mittetoksiline ja pürogeenivaba.

SMI-SPON toode on gamma-steriliseeritud ja ükshaaval pakendatud blisterisse, valmis kohe kasutamiseks.

Kus kasutada

- ☒ Hambaravi
- ☒ Plastiline kirurgia
- ☒ Vaskulaarne kirurgia
- ☒ Ortopeediline kirurgia
- ☒ Kõrva-nina-kurgu kirurgia
- ☒ Neurokirurgia
- ☒ Kõhukirurgia
- ☒ Anorektaalne kirurgia
- ☒ Urogenitaalne kirurgia
- ☒ Günekoloogiline kirurgia

Kuidas kasutada SMI-SPON

- ☒ Lõigake soovitud suuruses tükk
- ☒ Paigaldage käsnn kas kuivas olekus või füsioloogilise soolalahusega immutatult
- ☒ Kui kasutatakse kuival, asetada käsnn verejooksu kohale ja hoida mõõduka surve all, kuni verejooks lakkab
- ☒ Kui kasutatakse niiskena, kasta käsnn lahusesse, seejärel pigistada kinnaste vahel, et eemaldada õhumullid, ja asetada tagasi soolalahusesse kuni kasutamiseni

Toode		Kogus	Tootekood
Regular	70 x 50 x 10 mm	10 tk	ZHG705010
Standard	80 x 50 x 10 mm	10 tk	ZHG805010
Dental	10 x 10 x 10 mm	32 tk	ZHG101010
Tampon	80 x 30 mm DIA	6 tk	ZHG8030
Special	80 x 50 x 1 mm	20 tk	ZHG805001
Film	200 x 70 x 0.5 mm	10 tk	ZHG20070005



*For quality
&
safety*

smi
www.sutures.be