

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID



<b>Tüüp</b>	Punatud ja kaetud multifilament
<b>Koostis</b>	Polüglükoolhape
<b>Kate</b>	Polücaprolactone ja kaltsiumstearaat (1%)
<b>Värv</b>	Beež - värvitu / Violetne
<b>Koe reaktsioon</b>	Minimaalne
<b>Resorbeerumine</b>	Materjal laguneb täielikult hüdroolüüsi teel täielikult umbes 42 päevaga. Umbes 50% tõmbetugevusest säilib pärast 7 päeva.
<b>Pakend</b>	Karp sisaldab 12 niiti



*For quality  
&  
safety*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

**RAPID**  
POLYGLYCOLIC ACID

## OMADUSED

- Väga hea tõmbetugevus
- Sünteetiline
- Hüdrolüütiline lagunemine
- Punutud struktuur
  
- Kaetud punutud multifilament
  
- Hermeetiliselt suletud pakend

**NÄIDUSTUSED** Pindmiste pehmete kudede sulgemine: naha ja limaskesta õmblused, eriti plastiline kirurgia

sünnitusabi (episiotoomia)  
günekoloogia  
uroloogia (ümberlõikus)  
oftalmoloogia (konjunktiiv)  
lastekirurgia

## EELISED

Suurepärase koesobivus

Minimaalne koereaktsioon

Prognoositav resorbeerumiskiirus, kiire resorbeerumine

Suurepärase omadused:  
elastne,  
väga hästi käsitletav,  
hea sõlmekindlus

Läbib kudesid sujuvalt ja pehmelt, minimaalne hõõrdumine ja trauma

Hea sõlme jaotumine ja reguleeritavus

Vähenenud kapillaarsus


Toote steriilsus tagatud

**VASTUNÄIDUSTUSED** Kardiovaskulaarne kirurgia  
Neurokirurgia  
Ligatuurid


Kui haava on vaja toetada üle 7 päeva.



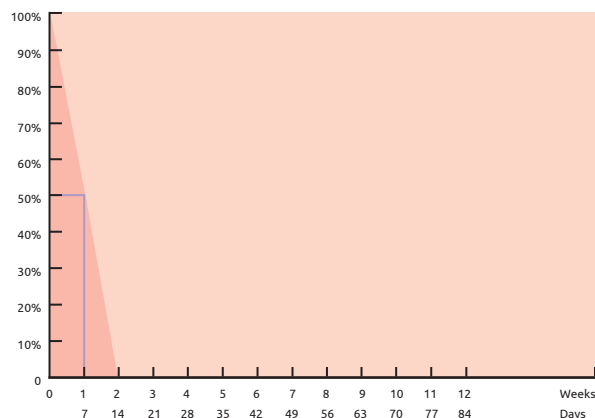


Ettevaatus immuunpuudulikkusega või aeglase haavaparandusega patsientidel.



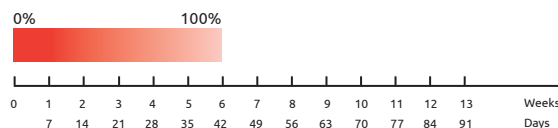








## TÕMBETUGEVUS



## RESORBEERUMINE



	Ümara struktuuriga lõikepind	Metric	USP	Pikkus	Tellimiskood
<b>1/2 ring</b> 	HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	värvitu 14100113
	HR 17 mm 	1	5/0	75 cm	värvitu 14100117
		1.5	4/0	75 cm	värvitu 14150117
	HR 22 mm 	2	3/0	75 cm	värvitu 14200117
		1.5	4/0	75 cm	värvitu 14150122
		2	3/0	75 cm	värvitu 14200122
			3	2/0	75 cm

	Lõikepind: Reverse cutting	Metric	USP	Pikkus	Tellimiskood
<b>3/8 ring</b> 	DS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	värvitu 14071512
		1	5/0	75 cm	värvitu 14101512
		1.5	4/0	75 cm	värvitu 14151512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	värvitu 14071512P
		1	5/0	50 cm	värvitu 14101512P
		1.5	4/0	50 cm	värvitu 14151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	värvitu 14101516
		1.5	4/0	75 cm	värvitu 14151516
		2	3/0	45 cm	värvitu 14201516
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	värvitu 14101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	värvitu 14101519
		1.5	4/0	75 cm	värvitu 14151519
		2	3/0	75 cm	värvitu 14201519
		3	2/0	75 cm	värvitu 14301519
	DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	värvitu 14151519P
		2	3/0	50 cm	värvitu 14201519P
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	värvitu 14151519VB
2		3/0	75 cm	värvitu 14201519VB	
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	värvitu 14201524	
	3	2/0	75 cm	värvitu 14301524	
DS 24 mm Easy Pass 	3	2/0	50 cm	värvitu 14301524P	

 Lõikepind: Reverse cutting		Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
<b>1/2 circle</b> 	HS 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>värvitu</i> 14151417
			2	3/0	45 cm	<i>värvitu</i> 14201417
 Ümara struktuuriga otsa suunas kitsenev lõikepind		Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
<b>1/2 ring</b> 	HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>värvitu</i> 14200517
 Ümara struktuuriga otsa suunas kitsenev lõikepind		Metric	USP	Pikkus		Tellimiskood
<b>3/8 ring</b> 	DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>värvitu</i> 14100416
			1.5	4/0	75 cm	<i>värvitu</i> 14150416
			2	3/0	75 cm	<i>värvitu</i> 14200416
	DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>värvitu</i> 14150419
			2	3/0	75 cm	<i>värvitu</i> 14200419